

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES



Equilibrio de humedad



Tejido elástico



No irrita la piel

·Doble densidad en toda la prenda, con áreas de mayor capacidad de absorción.


·**Gran adaptabilidad**, no sólo en el contorno, sino también en las líneas y pliegues naturales de la piel, que **evita presión** en zonas delicadas y de riesgo.

·**Sin costuras**, lo que previene y **evita rozaduras**.

·Líneas de tensión cutánea

Son el resultado de la interacción entre factores internos y externos que ejercen su acción sobre la piel (tejido muscular).

Las propiedades elásticas y de firmeza de la piel están dadas por la cantidad y disposición de las fibras colágenas y elásticas de la dermis.

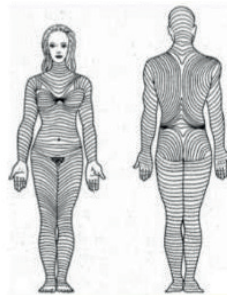

·Su **alta transpirabilidad** aporta una **sensación fisiológica de confort**, al absorber la **humedad un 50% más** que las prendas convencionales de algodón, y dirigiéndola al exterior del top. Además, su meticoloso sistema de tejeduría lo hace **extremadamente suave** al tacto dotándolo de un **gran rendimiento** y una **mayor durabilidad**.



0000 negro



0101 blanco

INDICADO PARA:

- Edema de la mama
- Eczema y dermatitis
- Reducción de cicatrices
- Exceso sudoración
- Micosis submamaria
- Pielas delicadas
- Sujeción anatómica de la mama

TECNOLOGÍA

La tecnología textil Regenactiv®, está basada en la interacción de dos hilos que tejidos entre sí confieren a las prendas MUVU sus cualidades protectoras.



regenactiv®
Viscosa CH



SILVER
BASE
POLIAMIDA ION

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

- **Protección frente al desarrollo de gérmenes, por lo que:**
Previene infecciones en la piel
Previene la aparición de malos olores
- **Reduce y evita:**
Sobrecalentamiento de la piel
Irritación dérmica
- **Gran capacidad de absorción:**
Absorbe el exceso de humedad colaborando al mantenimiento de un ambiente cutáneo óptimo que favorece y mejora la recuperación propia de la piel.
- **Acelera el proceso de curación de lesiones en la piel al mantenerla limpia, favoreciendo la renovación de la epidermis.**

COMPOSICIÓN

1/Viscosa CH ▶ **Quitosano de origen marino:** alta actividad antimicrobiana, capacidad hemostática y gran capacidad de absorción.

2/Poliamida ion ▶ **Complejo orgánico de plata adsorbida en dióxido de silicio:** proporciona a la prenda propiedades preventivas frente a las infecciones más frecuentes de gérmenes y hongos propios de la piel. Hilo antiestático y termorregulador que usa la conductividad de la plata para regular la temperatura corporal.

3/**Elastano:** Utilizado en puntos de refuerzo y sujeción que se adaptan a la anatomía del cuerpo, y al contorno del seno, proporcionando un control firme y equilibrado.

Características permanentes en la prenda testeada en más de 135 lavados.

Las propiedades mencionadas son permanentes e intrínsecas en las fibras que componen los hilos, ya que los elementos de los tejidos Regenactiv® han sido incorporados durante el proceso de elaboración de las fibras del hilado.


Textil técnico-sanitario
Testado en laboratorios independientes

TALLAS, COLORES Y COMPOSICIÓN





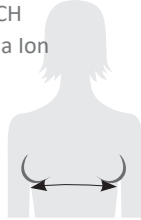

·Tallas*: S: 75/80 ·Composición:
M: 85/90 64% Viscosa CH
L: 95/100 28% Poliamida Ion
XL: 105/110 8% Elastano

·Colores: Blanco / Negro

*Medir la circunferencia del pecho
justo por debajo del esternón.



RECOMENDACIONES DE LAVADO

-  Lavado máximo a 60°C
-  No planchar
-  No usar ningún blanqueador
-  No lavar en seco
-  No usar secadora
-  No usar suavizantes

PROPIEDADES




PREVENCIÓN DEL EDEMA DE MAMA

- 1/ Duerma **sin** sujetador.
- 2/ Use la **talla correcta** de sujetador (la letra de la copa puede variar según la morfología mamaria).
- 3/ Una **talla no adecuada** puede provocar problemas de drenaje linfático y deformación de la mama.
- 4/ Use sujetador **sin costuras** en la copa, **ni aros**.
- 5/ **Evite** usar sujetadores de cuerpo (con faja).
- 6/ Aplique cremas hidratantes o jabón durante el baño, en **sentido ascendente hacia axila**. Siempre usando la mano contralateral.



- 7/ Usar correctamente el sujetador:

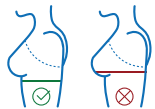


A/ La banda inferior del sujetador debe apoyarse sobre el tórax, inmediatamente por debajo del pliegue submamario, y nunca sobre la mama.



B/ El pecho debe caber dentro de la copa sin plegarse (la piel de la mitad inferior de la mama no debe contactar con la piel del tórax), ni quedar fuera de ella (no salirse por encima del escote).



C/ La banda inferior del sujetador debe estar al mismo nivel (misma altura) en toda circunferencia del tórax, evitando que la parte posterior quede más alta que la anterior. Evitar la costumbre de arrastrar la parte anterior hacia abajo al vestir sujetador.

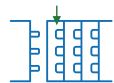

D/ Los tirantes no deben clavarse en los hombros. Un sujetador nuevo debe abrocharse en el primer corchete (para poder seguir ajustándose según se vaya deteriorando con el uso).

Textil técnico-sanitario
Testado en laboratorios independientes